
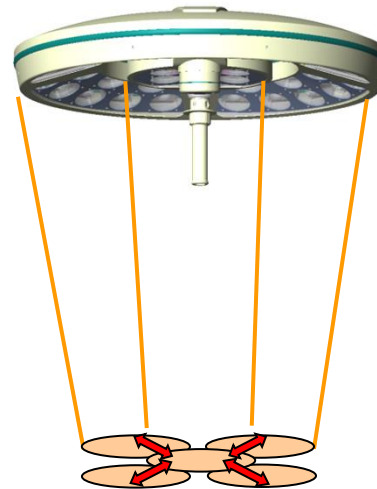


**DR. MACH LED 5MC / 3MC / 2MC LEIKKAUSVALAISIMET**


Valon säädöt steriloitavasta kahvasta

A

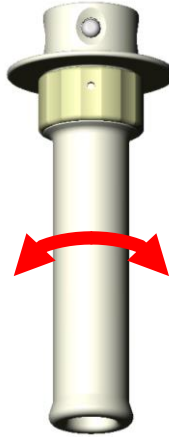

**(A) Fokusointi:** Valokentän kokoa voidaan säätää kääntämällä steriloitavan kahvan alaosaa.

B

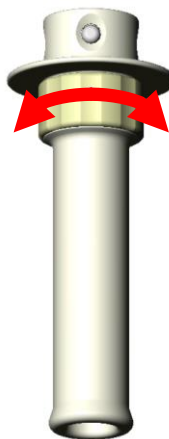


**(B) Lisätoiminnot:** Steriloitavan kahvan yläosasta kääntämällä on mahdollista ohjata valovoimakkuutta, valon värilämpötilaa, syvävalaisu toimintaa tai laser-osoitinta. Kahvan yläosaan on mahdollista asettaa vain yksi toiminto kerrallaan. Kahvan lisätoiminnot voidaan myös kytkeä kokonaan pois päältä.

Katso seuraava kappale – Valon säädöt ohjauspaneelista – asetaaksesi tai poistaaksesi kahvan yläosaan halutun toiminnon.


**Valon säädöt ohjauspaneelista****Huom:**

- Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia vain valaisimen päävirran ollessa kytkettynä päälle

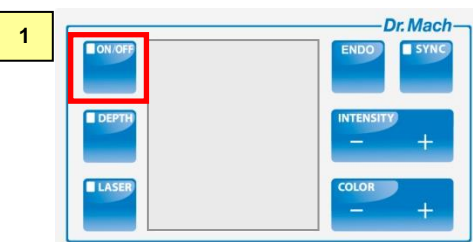

**(1)** Paina **ON/OFF-painiketta** kytkeäksesi Mach LED valaisimen **PÄÄLLE ja POIS**

2

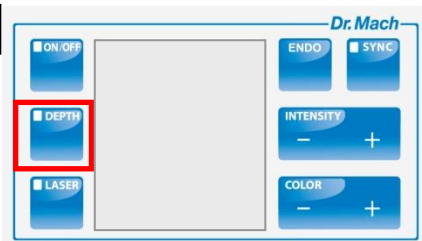


(2) **Syvävalon aktivoimiseksi** on kaksi vaihtoehtoa:

- Painamalla ohjauspaneelin **DEPTH-painiketta**
- Steriloitavan kahvan yläosasta vastapäivään kääntämällä. (kts. ensimmäinen sivu)

Aktivoidaksesi syvävalon käytön steriloitavasta kahvasta paina yhtäaikaisesti **DEPTH ja ON/OFF-painikkeita**. Näytön "DEPTH" merkintä vilkkuu merkiksi toiminnon päälle kytketyksi.

3

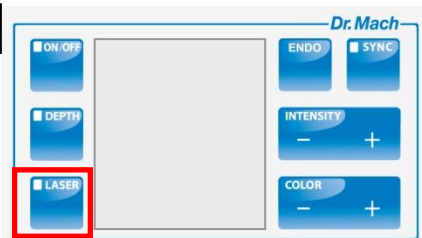


(3) **Laser-osoittimen aktivoimiseksi** paina **LASER** painiketta. - Huom! Laser osoitinta ei voida turvallisuussyistä aktivoida seinäpaneelista

Aktivoidaksesi laser-osoittimen käytön steriloitavasta kahvasta paina yhtäaikaisesti **LASER ja ON/OFF-painikkeita**. Näytön "LASER" merkintä vilkkuu merkiksi toiminnon päälle kytketyksestä.

Steriloitavan kahvan yläosaa oikealle kääntämällä laser-osoitin kytkeytyy päälle – vasemmalle kääntämällä laser-osoitin kytkeytyy pois päältä.

4

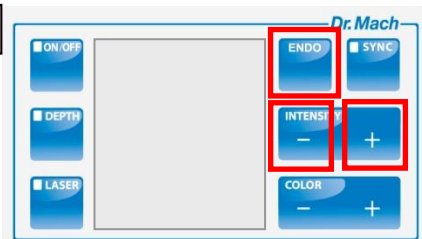

(4) **Valovoimakkuuden säätö**  
Vähentääksesi valovoimakkuutta paina **INTENSITY - painiketta** toistuvasti.


Lisätäksesi valovoimakkuutta paina **INTENSITY + painiketta** toistuvasti.

Kytkeäksesi **ENDO-valon** päälle paina **ENDO** painiketta

Aktivoidaksesi valovoimakkuuden käytön steriloitavasta kahvasta paina yhtäaikaisesti **INTENSITY- tai INTENSITY+ painiketta** sekä **ON/OFF** painiketta. Valovoimakkuuden ilmaisevan palkiston reuna vilkkuu merkiksi toiminnon päälle kytketyksestä.

Steriloitavan kahvan yläosaa oikealle kääntämällä valovoimakkuus kasvaa yhden pykälän – vasemmalle kääntämällä valovoimakkuus pienenee.

5

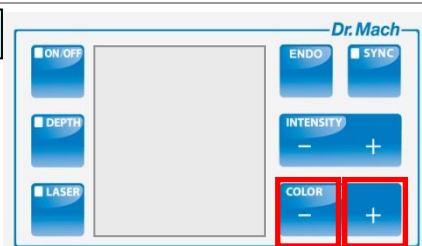


(5) **Väriämpötilan säätö**

Vähentääksesi väriämpötilaa paina **COLOR -** painiketta. Lisätäksesi väriämpötilaa paina **COLOR +** painiketta.

Aktivoidaksesi väriämpötilan käytön steriloitavasta kahvasta paina yhtäaikaisesti **COLOR- tai COLOR+ painiketta** sekä **ON/OFF** painiketta. Väriämpötilan näyttö vilkkuu merkiksi toiminnon päälle kytketyksestä.

Steriloitavan kahvan yläosaa oikealle kääntämällä väriämpötila kasvaa yhden pykälän – vasemmalle kääntämällä väriämpötila pienenee.

6

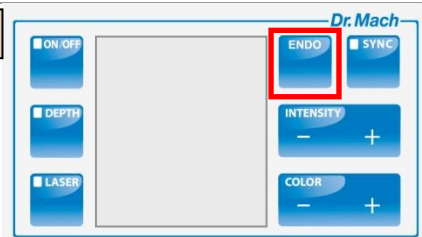

(6) Kaikki steriloitavan kahvan yläosan toiminnot voidaan kytkeä pois päältä painamalla **ENDO-painiketta yhtäaikaisesti ON/OFF-painikkeen kanssa**

(7) **Sync**-painikkeella voidaan yhdelle valaisimelle asetetut väriämpötilan sekä kirkkauden arvot kopioida toiselle/toisille valaisimille

### HUOM!

- **Kun steriloitavan kahvan yläosalle kytketään jokin yllä kuvatuista toiminnoista korvaa tämä aiemmin asetetun function käytön steriloitavan kahvan yläosasta.**